

## PARETI MOBILI

### ISTRUZIONE DI MONTAGGIO



REV.01/2013



<b>CODICE</b>	<b>DIMENSIONI</b>	<b>ANTA</b>	<b>VISIVA</b>	<b>PESO</b>
P-PM-01	CM 80 X 190H	1	CM 24 X 30	KG 73
P-PM-02	CM 80 X 190H	1	CM 30 X 40	KG 75
P-PM-03	CM 30+80+30 X 190H	3	CM 24 X 30	KG 105
P-PM-04	CM 30+80+30 X 190H	3	CM 30 X 40	KG 107

# CABLAS s.r.l.

Via Michelangelo Buonarroti, 52/B - 20093 Cologno M.se (Mi)

1)

Dopo aver posizionato il pannello centrale su di un piano idoneo, posizionare il vetro ANTIX (B) nella sua sede e bloccarlo con la cornice (C) utilizzando le sue viti.

2)

Posizionare, rispettando i riferimenti riportati sui pannelli, i due pannellini laterali (solo nel caso di pareti a tre ante) e fissarle utilizzando le apposite viti per legno.

3)

Applicare le gambe di supporto (E), come da disegno, e bloccarle al pannello centrale utilizzando le barre filettate (F) con le rondelle e i dadi in dotazione.

## ATTENZIONE

Il pannello centrale pesa circa 70 Kg. Si raccomanda di manovrarlo almeno in due persone.

