

## MANUALE

### OCCHIALI ANTIX



Gli occhiali protettivi antix sono stati studiati e realizzati appositamente per la protezione dai raggi-x.

Consigliamo di conservarli con cura in quanto il processo produttivo al quale vengono sottoposti è molto particolare.

### **!!!ATTENZIONE!!!**

- Gli occhiali antix non devono essere appesi al collo tramite il cordoncino fornito in quanto il loro peso potrebbe causarne la caduta;
- Dopo l'utilizzo si prega di riposizionare gli occhiali antix nella loro scatola così da evitare danneggiamenti;
- Le lenti degli occhiali antix non sono da considerarsi lenti di sicurezza; le stesse proteggono solo ed esclusivamente dai raggi-x;
- Gli occhiali antix non devono essere utilizzati se le circostanze potrebbero rendere possibile la caduta degli stessi;
- Le lenti antix non sono infrangibili; In caso di crepe nelle lenti, gli occhiali non devono più essere utilizzati;