



Via Michelangelo Buonarroti, 52/B - 20093 Cologno M.se (Mi)


ISTRUZIONI PER L'USO



PASSALASTRE

REV.01/2015

- 1) E' necessario (a cura del cliente) un falso telaio in abete, come da disegno, a seconda del modello passalastre.
- 2) Inserire il passalastre nel vano predisposto dal lato Diagnostica RX
- 3) Bloccarlo bene con cunei, spessori o altro.
- 4) Applicare la cornice di finitura costituita da n° 4 pezzi, da lato Camera Oscura.

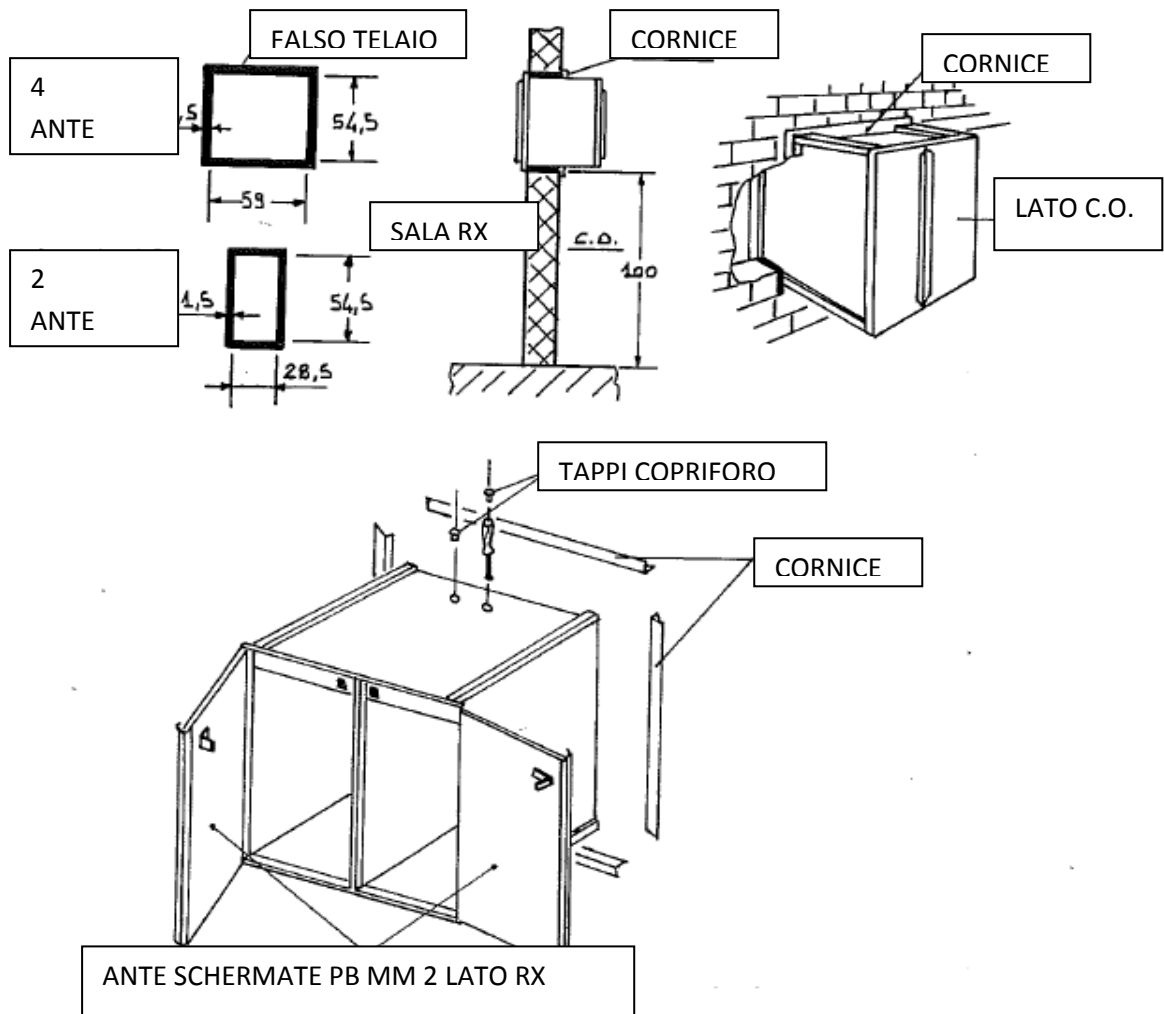

ATTENZIONE!!!

I passalastre vengono accuratamente collaudati presso la CABLAS s.r.l. in fase di produzione e sono quindi pronti all'uso, qual'ora dovessero esserci ante bloccate è possibile sbloccare agendo con un cacciavite (attraverso i fori superiori ad ogni scomparto dopo avere tolto i tappi copriforo) sulle forbici del meccanismo di apertura / chiusura alternata, ed eventualmente verificare la posizione delle squadrette sulle antine.

CODICE	ANTE	DIMENSIONI ESTERNE	DIMENSIONI FORO PARETE
D-PS-01	2	CM 35 X 58 X 54H	CM 28,5 X 54,5
D-PS-02	4	CM 66 X 58 X 54H	CM 58,5 X 54,5



Via Michelangelo Buonarroti, 52/B
20093 Cologno Monzese (MI)
Tel. (02) 253.80.88 r.a. - Telefax (02) 27300644
Sito Internet: www.cablas.com
E-mail: cablas@cablas.com

SCHERMATURE ANTIX - ACCESSORI PER RADIOLOGIA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

La sottoscritta "CABLAS S.r.l." con sede in
Via Michelangelo Buonarroti 52/B
20093 Cologno Monzese (MI)

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, che il prodotto

PASSALASTRE

Codici

D-PS-01	D-PS-02
---------	---------

al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme al DECRETO LEGISLATIVO n°626 del 19/12/1994 integrato dal DECRETO LEGISLATIVO n°242 del 19/03/1996 e specificatamente all'Art. 6 (Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori).

Il prodotto, inoltre presenta i seguenti requisiti :

- la protezione frontale con Pb. mm. 2 è conforme alle norme di "BUONA TECNICA" come previsto dall'art. 72 del D. Lgs. 230 del 1995, che ha recepito le direttive EURATOM in materia di Radiazioni Ionizzanti;
- la stessa protezione è stata prodotta presso officine specializzate;
- il piombo utilizzato è di prima fusione e puro a titolo 99,9%;

Cologno Monzese, anno 2013

CABLAS S.R.L.
Via Michelangelo, 52/B
20093 COLOGNO MONZESSE (MI)
S.r.l. - Via Sormani 34 - COLOGNO M. SE
Tel. R.A. 02 2538088 - Fax 02 27300644
Cod. Fisc. e P. IVA 11909230156

