

# CABLAS

s.r.l.

Via Michelangelo Buonarroti, 52/B - 20093 Cologno M.se (Mi)

## NEGATIVOSCOPIO ULTRAPIATTO



**MANUALE ISTRUZIONE, INSTALLAZIONE,  
USO E MANUTENZIONE**

**CE**

## ISTRUZIONI INSTALLAZIONE, USO, MANUTENZIONE “NEGATIVOSCOPIA LED”

### INSTALLAZIONE :

- Appendere il negatiscopio al muro utilizzando gli appositi fori sul retro a forma di chiave (Fig. 5)


### USO :

#### • Accensione :

- Collegare la presa di corrente con cavo in dotazione (Fig. 1)
- Posizionare l'interruttore generale su 1 (Fig. 1) si accende il puntino sul display (Fig. 2)
- Manuale : il settore si accende premendo il pulsante “on/off” (Fig. 2) sul display appare il grado di regolazione memorizzato nell'ultima accensione da 0 a 9 (Fig. 3)
- Se si desidera la funzione “Automatica” premere il pulsante (Fig. 2) appare sul display la “A” di Automatico (Fig. 4), il settore si accende all'inserimento della lastra tramite contatti (Fig. 6)

#### • Regolazione :

- Aumentare o diminuire l'intensità luminosa utilizzando i pulsanti (Fig. 2)

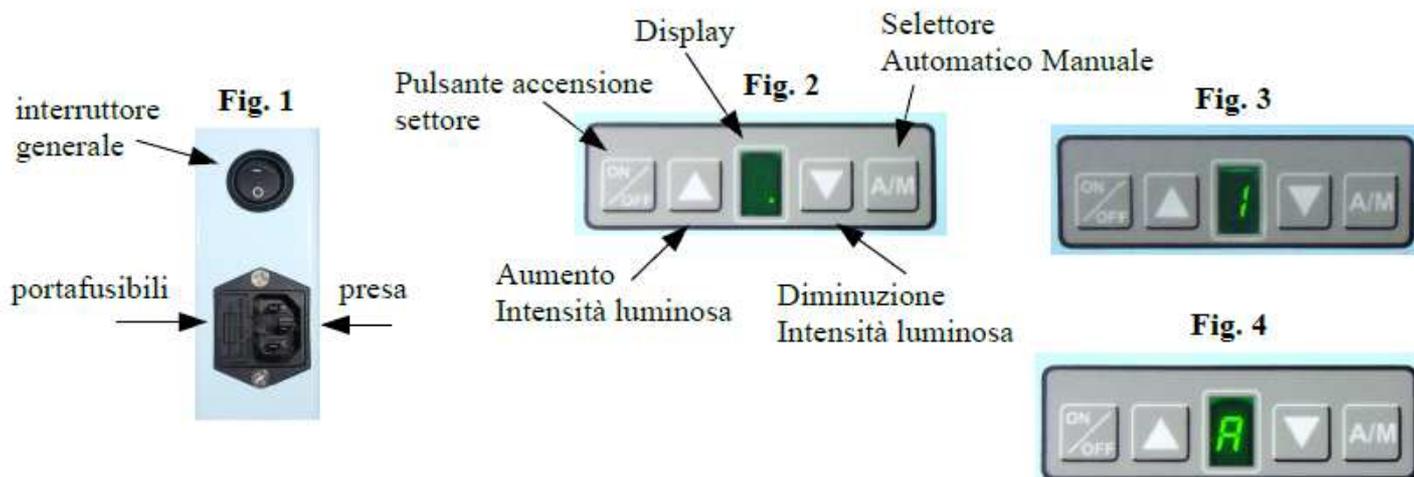

### MANUTENZIONE :

- Quando necessita, pulire il diffusore in plexiglas con carta morbida imbevuta con alcool
- Per accedere all'interno svitare il pannello posteriore (Fig. 5), operazione da effettuare da personale specializzato (viti sul bordo)

Contatti per funzione “automatico”

