



Via Michelangelo Buonarroti, 52/B - 20093 Cologno M.se (Mi)

VASCHE DI SVILUPPO MANUALE ALFA 4 MANUALE A-VS-20



Sviluppo manuale di pellicole rx fino al formato cm 35 X 43

COMPOSTO DA:

- 2 scomparti fissi da 5 lt per sviluppo e fissaggio
- 1 scomparto fisso da 28 lt per il lavaggio intermedio e finale
- Carico automatico e troppo pieno

DIMENSIONI :

Cm 27 x 48 x 96

MANUALE ISTRUZIONE E INSTALLAZIONE




REV.01/2015

1.0 INTRODUZIONE

La struttura della presente vasca è realizzata interamente in PVC anti acido per garantirVi qualità, affidabilità e garanzia nel tempo. E' divisa in tre scomparti indipendenti fra loro: uno di sviluppo (1) uno di fissaggio (2) entrambi con capacità di lt.5 e uno per il lavaggio intermedio e finale (3) con capacità di lt.28.

Ogni scomparto è dotato di un suo rubinetto (4) di scarico dei liquidi.

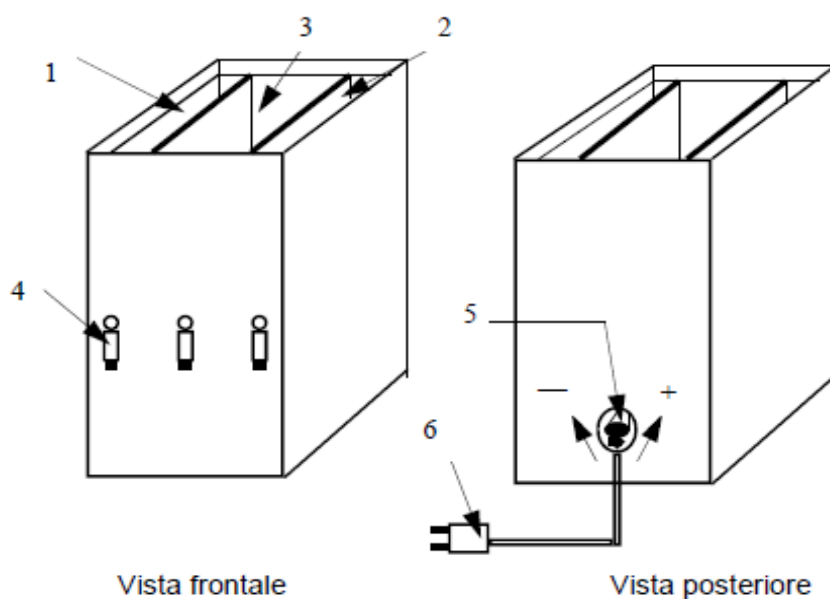

Legenda:

- 1- Scomparto di sviluppo
- 2- Scomparto di fissaggio
- 3- Scomparto di lavaggio
- 4- Rubinetti di scarico

2.0 INSTALLAZIONE

Prima di procedere all'installazione controllare che il materiale consegnato sia completo ed integro nelle sue parti.

• BASE D'APPOGGIO

Per evitare rovesciamenti non voluti, verificare sempre che la vasca sia in posizione sicura, ed appoggiata su di un piano idoneo

3.0 ATTIVAZIONE

Inserire la spina della vasca nella presa elettrica, alzare la leva dell'interruttore generale presente nel quadro in posizione "ON" e l'apparecchio è funzionante..

4.0 MANUTENZIONE

La vasca modello "**ALFA 4**" non ha bisogno di manutenzione particolare.

Si consiglia una pulizia periodica della vasca utilizzando una spugna non abrasiva. Scollegare la spina dalla presa di corrente prima di eseguire ogni operazione.

5.0 GARANZIA

La riparazione o la sostituzione delle parti difettose costituisce piena soddisfazione degli oneri di garanzia.

La garanzia non comprende nessun danno indiretto e sono esclusi materiali di normale consumo.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio o scorretto e dall'inosservanza delle informazioni contenute in questo manuale.

ATTENZIONE: QUESTO MANUALE DEV'ESSERE CONSERVATO PER TUTTA LA VITA DELLA VASCA E DEVE SEMPRE ESSERE A DISPOSIZIONE DELL'OPERATORE E DEL MANUTENTORE.

La Società CABLAS s.r.l. declina ogni responsabilità in caso di omissioni o manomissioni dell'apparecchio.