

CABLAS s.r.l.

Via Michelangelo Buonarroti, 52/B - 20093 Cologno M.se (Mi)

DAY FILM



MANUALE ISTRUZIONE E INSTALLAZIONE




REV.01/2015

1.0 INTRODUZIONE

Il contenitore **DAY – FILM** è un pratico e comodo sistema dello sviluppo manuale a luce giorno delle pellicole endorali, fino ad un formato di max 5 x 7 cm, grazie all'apposito sistema di introduzione delle mani a tenuta luce (5) e allo schermo di controllo inattinico(6).

Il tutto realizzato interamente in materiale antiacido.

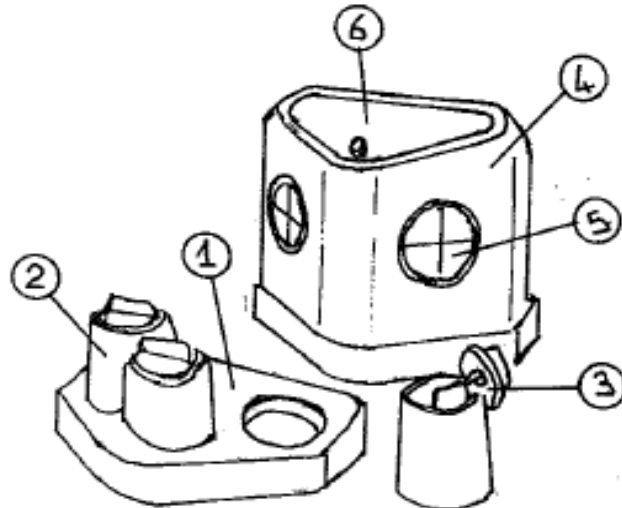

Legenda:

- 1- Basamento con gli appositi alloggiamenti per le tre bacinelle
- 2- Bacinelle con coperchio per sviluppo, fissaggio e lavaggio
- 3- Coperchio con Pinzetta
- 4- Copertura con fori per introdurre le mani
- 5- Manicotti per tenuta luce
- 6- Schermo inattinico di controllo del processo

DIMENSIONI:

cm 23x 33 x 31

2.0 UTILIZZO

Inserire le mani con la pellicola da sviluppare nei rispettivi manicotti destro e sinistro (5), togliere quindi la pellicola dall' involucre protettivo ed agganciarla alla pinzetta(3).

A questo punto è sufficiente immergerla nella bacinella (2) prima dello sviluppo e successivamente in quella del fissaggio previo un lavaggio intermedio e finale eseguito nell'apposita bacinella contenente acqua.

ATTENZIONE!!! Essendo il processo di sviluppo interamente manuale e dipendendo la qualità del risultato ottenuto da diversi fattori (tipo di pellicole, tipo e temperatura dei chimici ecc.) non è possibile stabilire dei tempi ottimali di lavoro, si consiglia pertanto di verificare costantemente attraverso lo schermo inattinico se il livello dell'immagine corrisponde a quello desiderato.

3.0 MANUTENZIONE

Il contenitore DAY-FILM non necessita di particolare manutenzione se non una periodica pulizia di tutte le sue parti con una spugna o panno evitando di utilizzare prodotti abrasivi.

4.0 GARANZIA

La riparazione o la sostituzione delle parti difettose costituisce piena soddisfazione degli oneri di garanzia.

La garanzia non comprende nessun danno indiretto e sono esclusi materiali di normale consumo.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio o scorretto e dall'inosservanza delle informazioni contenute in questo manuale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

La sottoscritta "CABLAS S.r.l." con sede in
Via Michelangelo Buonarroti 52/B
20093 Cologno Monzese (MI)

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, che il prodotto

DAY FILM

Codici

W-DF-01

Rientra nella direttiva 93/42 CEE concernente i DISPOSITIVI MEDICI,
recepita in ITALIA con D. Lgs n°46 del 24/09/97 in quanto considerato
"ACCESSORIO" (ART. 1 comma B)

E secondo i criteri di classificazione (allegato IX) rientra nella "CLASSE 1".

Il fabbricante oppone quindi la marcatura CE secondo l'allegato VII della direttiva stessa

Cologno Monzese, anno 2013

CABLAS S.R.L.
Via Michelangelo, 52/B
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
S.r.l. - Via Sormani 34 - COLOGNO M.SE
Tel. R.A. 02 2538088 - Fax 02 27300644
Cod. Fisc. e P. IVA 11903230156

