

CABLAS s.r.l.

Via Michelangelo Buonarroti, 52/B - 20093 Cologno M.se (Mi)

DUPLICATORE DI RADIOGRAFIE




MANUALE D'ISTRUZIONE E INSTALLAZIONE



REV.01/2015

1.0 INTRODUZIONE

La struttura del presente DUPLICATORE è costruita con lamiera di acciaio verniciata a fuoco. La luce è data da una lampada a luce nera ULTRAVIOLETTA da 15W. Il piano di appoggio è in vetro opalino, con pressore in gomma piombifera al fine di ottenere una maggiore pressione e quindi migliore adesione fra originale e pellicola per controtipo.

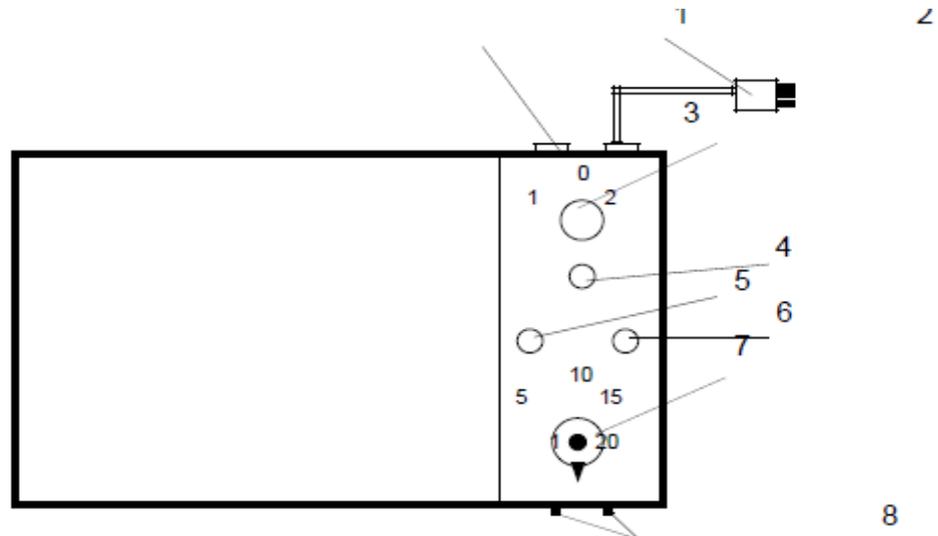

LEGENDA

- 1) Interruttore generale
- 2) Cavo più spina
- 3) Regolatore intensità
- 4) Led luminoso di rete
- 5) Led luminoso di U.V.
- 6) Pulsante di start
- 7) Temporizzatore
- 8) Fusibili

2.0 INSTALLAZIONE

Prima di procedere all'installazione controllare che il materiale consegnato sia integro in ogni sua parte. Il luogo tipico di utilizzo del duplicatore è la camera oscura.

Deve essere appoggiato su un piano idoneo e in bolla.

3.0 COLLEGAMENTO ELETTRICO

Il duplicatore è già fornito di cavo di alimentazione con spina (7) e relativi fusibili (8) di protezione. Il cliente deve predisporre nelle vicinanze una presa di corrente idonea. Una volta inserita la spina nella presa agire sull'interruttore generale (1) e verificare che vi sia corrente, (led -4-acceso)

4.0 FUNZIONAMENTO

Per il suo utilizzo procedere come segue:

- Appoggiare la lastra fotografica da riprodurre sopra il diffusore opalino e sovrapporre alla stessa la pellicola vergine (adatta per controtipo) , curando che la parte emulsionata sia a contatto con l'immagine da produrre e abbassare il pressore in gomma.
- Posizionare il tempo desiderato da 1 a 20 secondi; azionando la manopola (7)
- Posizionare la levetta (3) in una delle 3 posizioni:
 - 0 luce minima
 - 1 luce media
 - 2 luce massima
- Premere il pulsante START (6) si accenderà il LED UV (5) e rimarrà acceso il tempo preimpostato.
- Procedere allo sviluppo del duplicato

DURANTE LA FASE DI SVILUPPO NON ALZARE L PRESSORE IN GOMMA.

REGOLAZIONE CONSIGLIATA

LUCE POSIZIONE 1 (rif.3)

TIME POSIZIONE 10 (rif.7)

ALIMENTAZIONE 230 V – 50 Hz

5) MANUTENZIONE

Il duplicatore non ha bisogno di manutenzione particolare. Si consiglia di pulire regolarmente il diffusore con un panno per asportare polvere e/o impronte che possono filtrare l'emissione di luce e creare degli artefatti sulla copia.

6) SOSTITUZIONI DI PARTI INTERNE

Per la sostituzione della lampada o di altre parti interne è necessario apportare il vetro opalino, tenuto nella sede con del biadesivo (dopo avere tolto il pressore in gomma con l'angolare che lo blocca), oppure asportando il pannello comandi agendo sulle viti che lo bloccano. Nel caso di sostituzione di lampade, fusibili

e/o parti interne si raccomanda di utilizzare componenti aventi le stesse caratteristiche degli originali.

ATTENZIONE!! Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale esperto e qualificato e comunque sempre dopo avere disinserito la spina dalla presa di corrente.

7) GARANZIA

La riparazione o la sostituzione delle parti difettose costituisce piena soddisfazione degli oneri di garanzia. La garanzia non comprende nessun danno indiretto e sono esclusi materiale di normale consumo. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio o scorretto e dall'innosservanza delle informazioni contenute in questo manuale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

La sottoscritta "CABLAS S.r.l." con sede in
Via Michelangelo Buonarroti 52/B
20093 Cologno Monzese (MI)

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, che il prodotto

DUPLICATORE DI RADIOGRAFIE

Codici

L-DP-01

elencato e descritto nel proprio catalogo, al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme
alle seguenti norme tecniche :

- EN 60601-1 (88) ; + all. 1 (91) ; + all. 2 (95)
- EN 50081-1 ed. 1992 / EN 50082-1 ed. 1992 / EN 55022 ed. 1994
- EN 60555-2 ed. 1986 / EN 60555-3 ed. 1986

e quindi rispondente ai requisiti essenziali della direttiva :

"DISPOSITIVI MEDICI" 93/42/CEE recepita con decreto nr. 46 del 24 Febbraio 1997 e
successive modifiche.

Inoltre la presente dichiarazione è basata su :

- dichiarazione richiesta dell'allegato VII della Direttiva 93/42/CEE
- la classificazione del prodotto in oggetto, in accordo all'allegato IX della presente
Direttiva, è di CLASSE 1.

Cologno Monzese, anno 2013

CABLAS S.R.L.

Via Michelangelo, 52/B
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
S.r.l. - Via Sormani 34 - COLOGNO M.SE
Tel. R.A. 02 2538088 - Fax 02 27300644
Cod. Fisc. e P. IVA 11903230156

