

CABLAS s.r.l.

Via Michelangelo Buonarroti, 52/B - 20093 Cologno M.se (Mi)

ESSICCATORE E-EA-03



MANUALE ISTRUZIONE E INSTALLAZIONE




REV.01/2015

1.0 INTRODUZIONE

La struttura degli essiccatori è realizzata in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco in modo da resistere all'aggressione dell'acqua o residui di chimici presenti sulle pellicole. Vengono prodotti in due modelli:

- Modello con capacità per 15 telai dim. cm 59 x 50 x 120 h – Kg 30

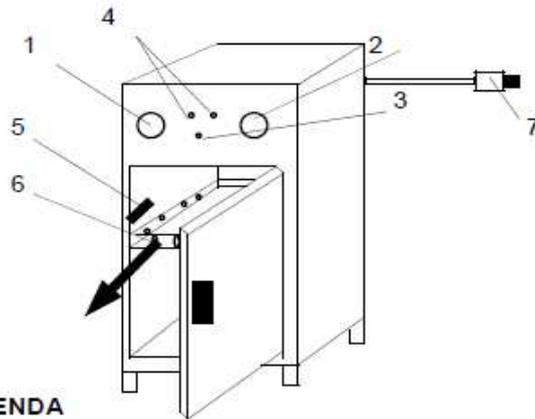

LEGENDA

- 1-Termostato
- 2-Timer
- 3-Led luminoso di riscaldamento in corso
- 4-Fusibili
- 5-Sonda
- 6-Telaio estraibile
- 7-Spina elettrica

2.0 INSTALLAZIONE

Prima di procedere all'installazione controllare che il materiale consegnato sia integro in ogni sua parte. Gli essiccatori vengono accuratamente collaudati in fase di produzione e sono pertanto pronti all'uso, basta inserire la spina (7) nella presa di corrente, prevedere nelle vicinanze una presa da 10A, 230Vac + Terra, 50Hz.

3.0 FUNZIONAMENTO

Per l'utilizzo è sufficiente impostare la temperatura desiderata sulla scala graduata del Termostato (1).

All'interno dell'essiccatore è posizionata la sonda(5) per il rilievo della temperatura.

Per l'accensione basta ruotare il Timer (2) impostando il tempo voluto. Per tutto il tempo impostato funzionerà la ventola interna per una migliore distribuzione dell'aria calda nell'essiccatore.

Il Led luminoso (3) indicherà quando è attivo il ciclo di riscaldamento.

I fusibili (4), posti frontalmente, sono del tipo ritardato da 5A.

4.0 CARICAMENTO

L'apertura in entrambi i modelli è frontale in modo da agevolare le operazioni di carico/scarico dei telai portapellicole nell'apposito supporto (6) inserito a coulisse nelle guide laterali.

5.0 MANUTENZIONE

L'essiccatore non ha bisogno di manutenzione particolare se non una periodica pulizia, (prima di procedere scollegare la spina dalla presa di corrente). Nel caso di mancato funzionamento verificare l'idoneità dei fusibili sostituendoli con modelli simili. Se il guasto dovesse persistere chiamare il servizio di assistenza tecnica CABLAS s.r.l. a Voi più vicino.

ATTENZIONE!!! Tutte le operazioni di installazione e/o manutenzione devono essere eseguite da personale esperto e qualificato e solo dopo avere tolto la spina dalla presa di corrente.

6.0 GARANZIA

La riparazione o la sostituzione delle parti difettose costituisce piena soddisfazione degli oneri di garanzia.

La garanzia non comprende nessun danno indiretto e sono esclusi materiali di normale consumo.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio o scorretto e dall'inosservanza delle informazioni contenute in questo manuale.

ATTENZIONE: questo manuale dev'essere conservato per tutta la vita dell' ESSICCATORE e deve essere sempre a disposizione dell'operatore e del manutentore.

CODICE	DIMENSIONI	VOLT	WATT	PESO
E-EA-03	CM 59 X 50 X 120H	220/50 Hz	1000	KG 30