

CABLAS s.r.l.

Via Michelangelo Buonarroti, 52/B - 20093 Cologno M.se (Mi)

VASCHE DI SVILUPPO MANUALE TERMOREGOLATE

ALFA 2



MANUALE ISTRUZIONE E INSTALLAZIONE

CE

REV.01/2015

1.0 INTRODUZIONE


La struttura della presente vasca è realizzata interamente in PVC anti acido per garantirVi qualità, affidabilità e garanzia nel tempo.

La vasca ha una zona sviluppo con resistenze corazzate e termoregolate.

La vasca è completa di una bacinella estraibile dalla capacità di lt. 10 per lo sviluppo.

Una bacinella estraibile dalla capacità di lt.10 per il fissaggio.

La zona di lavaggio intermedio e finale ha una capacità di lt.80.

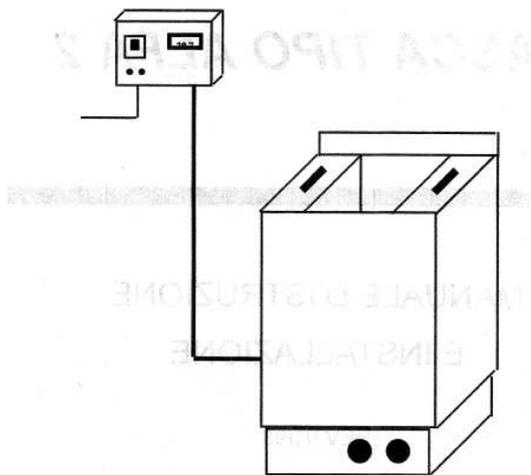

N.B.: FISSARE IL QUADRO ELETTRICO AD UNA ALTEZZA ACCESSIBILE AGLI OPERATORI

ATTENZIONE: PRIMA DI INSERIRE LA SPINA NELLA PRESA ELETTRICA, ASSICURARSI CHE NELLA VASCA CI SIA DELL'ACQUA ALTRIMENTI SI POTREBBE DANNEGGIARE LA RESISTENZA ELETTRICA.

2.0 INSTALLAZIONE

Prima di procedere all'installazione controllare che il materiale consegnato sia completo ed integro nelle sue parti.

- **BASE D'APPOGGIO**

Per evitare rovesciamenti non voluti, verificare che la vasca sia in piano

- **COLLEGAMENTO ELETTRICO**

La vasca è fornita con cavo d'alimentazione con spina.

L'utente deve predisporre una presa elettrica nelle vicinanze dell'apparato con portata uguale o superiore a 6A con **TERRA**.

ATTENZIONE: I CAVI DI COLLEGAMENTO DALLA VASCA AL QUADRO ELETTRICO NON DEVONO ESSERE ASSOLUTAMENTE ALLUNGATI O MANOMESSI.

3.0 ATTIVAZIONE

Inserire la spina della vasca nella presa elettrica, alzare la leva dell'interruttore generale presente nel quadro in posizione "ON" e l'apparecchio è funzionante.

4.0 REGOLAZIONE

Tramite un termostato presente nell'apparecchiatura, voi potete regolare la temperatura del liquido al valore ottimale consigliato dal produttore stesso.

5.0 PROGRAMMAZIONE PARAMETRI.

SET: premendolo e rilasciandolo si ottiene la visualizzazione del valore impostato della temperatura.

Tenendo premuto il tasto SET e agendo con le frecce rosse e azzurre, si incrementa o si diminuisce il valore impostato.

dT: differenziale. Differenziale d'intervento. Per regolarlo premere l'apposito pulsante e agire sui tasti freccia per aumentare o diminuire il valore.

6.0 MANUTENZIONE

La vasca tipo ALFA 2 termoregolata non ha bisogno di manutenzione particolare.

Si consiglia di scaricare completamente la vasca per evitare il depositarsi di calcare e altre incrostazioni sia sulla resistenza elettrica che su altre parti della vasca.

7.0 SOSTITUZIONE PARTI INTERNE

Se il cavo d'alimentazione risulta danneggiato, esso dev'essere sostituito o dal costruttore o da un centro d'assistenza autorizzato

8.0 GARANZIA

La riparazione o la sostituzione delle parti difettose costituisce piena soddisfazione degli oneri di garanzia.

La garanzia non comprende nessun danno indiretto e sono esclusi materiali di normale consumo.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio o scorretto e dall'inosservanza delle informazioni contenute in questo manuale.

ATTENZIONE: QUESTO MANUALE DEV'ESSERE CONSERVATO PER TUTTA LA VITA DELLA VASCA ALFA 2 TERMOREGOLATA E DEVE SEMPRE ESSERE A DISPOSIZIONE DELL'OPERATORE E DEL MANUTENTORE.

La Società CABLAS s.r.l. declina ogni responsabilità in caso di omissioni o manomissioni dell'apparecchio.



Via Michelangelo Buonarroti, 52/B
20093 Cologno Monzese (MI)
Tel. (02) 253.80.88 r.a. - Telefax (02) 27300644
Site Internet: www.cablas.com
E-mail: cablas@cablas.com

SCHEMATURE ANTIX - ACCESSORI PER RADIOLOGIA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

La sottoscritta "CABLAS S.r.l." con sede in
Via Michelangelo Buonarroti 52/B
20093 Cologno Monzese (MI)

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, che il prodotto

VASCHE DI SVILUPPO MANUALE TERMOREGOLATE

Codici

A-VS-01	A-VS-03
---------	---------

La vasca Termoregolata è conforme alla Direttiva "BASSA TENSIONE 73/23/CEE" e alle leggi successive.

Inoltre costruita uniformemente alle norme armonizzate

EN 60335-1 ed.1990

EN 60335-2-73 ed 1997

Se installato e messo in funzione secondo le istruzioni contenute nella documentazione tecnica fornita col prodotto.

Cologno Monzese, anno 2013

CABLAS S.R.L.
Via Michelangelo, 52/B
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
S.U.I.: Via Sormani 34 - COLOGNO M. SE
Tel. R.A. 02 2538088 - Fax 02 27300644
Cod. Fisc. e P. IVA 11909230156

